

LiquiBand® Exceed™ XS

Für eine gleichmäßige, einheitliche Wundabdeckung

						
BARRIERE GEGEN MIKROORGANISMEN	60 SEKUNDEN POLYMERISATIONSDAUER	STARK UND SICHER	EINZIGARTIGE SPITZE	HOHE VISKOSITÄT	LAGERUNG BEI RAUMTEMPERATUR	HERGESTELLT IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH

✓ TECHNOLOGIE FÜR VERSTOPFUNGSFREIE ANWENDUNG

- ▶ Verstopfungsfreie Spitze für einen gleichmäßigen Kleberfluss
- ▶ 0,4g Kleber pro Applikator zum Verschließen von Wunden bis etwa 7 cm Länge

✓ BENUTZERFREUNDLICHER APPLIKATOR

- ▶ Flügelapplikator für sichere und einfache Aktivierung
- ▶ Kontrolliertes Auftragen des Klebers



✓ EINZIGARTIGE APPLIKATORSPITZE

- ▶ Durch die elliptische Form der Applikationsspitze ist ein schmales oder breites Auftragen des Klebers möglich
- ▶ Die innovative Applikationsspitze stellt eine gleichmäßige und verstopfungsfreie Anwendung sicher

✓ REINE OCTYL-FORMEL

- ▶ Optimiert für Haltbarkeit und Flexibilität
- ▶ Sorgt für hohe Viskosität
- ▶ Erzeugt engen Hautkontakt
- ▶ Kein „brennen“ beim Einsatz

Gebrauchsanweisung *LiquiBand® Exceed™ XS*

LiquiBand® Exceed™ XS Topischer Hautkleber besitzt eine einzigartige Filz-Applikatorspitze, die eine gleichmäßige, einheitliche Anwendung vereinfacht, die in drei Schritten erfolgt.

✓ SCHRITT EINS

- ▶ Halten Sie den Applikator aufrecht und drücken Sie die Applikator-Flügel ein, bis Sie ein knackendes Geräusch hören.



✓ SCHRITT ZWEI

- ▶ Drehen Sie den Applikator und drücken Sie die Flügel leicht ein, um den Applikator zu aktivieren. Wenn die Spitze violett wird, ist LiquiBand® Exceed™ XS einsatzbereit.
- ▶ Die Wunde muss vor dem Verschließen sauber und trocken sein.



✓ SCHRITT DREI

- ▶ Halten Sie die Wundränder zusammen und tragen Sie eine gleichmäßige Schicht LiquiBand® Exceed™ XS über die gesamte Länge der Wunde auf.
- ▶ Halten Sie die Wundränder noch 60 Sekunden zusammen.



LiquiBand® Exceed™ XS

Größe	Menge pro Box	REF	PZN
0,4 g	10	72014024	15206233

i Wird das Gerät in der Nähe der Augen angewendet, passen Sie die Lage des Patienten daran an. Tragen Sie als Barriere nahe der Wunde eine Schicht Vaseline auf und schützen Sie das Auge des Patienten mit Kompresse.